

MRS-TITAN® Standard MRS-TITAN® Maximum




Größenbestimmung

Größenkorrelation

Präparation Acetabulum

- | Fräsung D1/ Pfannenrotationszentrum
- | Fräsung D2 / cranialer Defekt
- | Größe Originalimplantat
- | Größe Probeimplantat

Die entsprechende Größenauswahl bzw. die Korrelation Fräsdurchmesser zur Größe des Probe- und Originalimplantats (2 mm Gesamt-Press-Fit) kann aus der Tabelle entnommen werden. Der Versatz der Außenkontur der zweiten Fräsung (D2) beträgt 6 mm zur ersten Fräsung (D1).

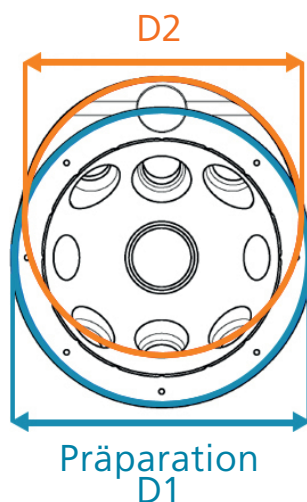

Tabelle

Korrelation Fräsdurchmesser zu Probe- und Implantatgröße mit 2 mm Gesamt-Press-Fit

Original- implantat [Gr.]	Probe- pfanne [Gr.]	Fräsung 1 (D1) Pfannenrotationszentrum [Ø mm]	Fräsung 2 (D2) Cranialer Defekt [Ø mm]
48	48	46	42
52	52	50	46
56	56	54	50
60	60	58	54
64	64	62	58
68	68	66	62
72	72	70	66
76	76	74	70

! HINWEIS

Diese Broschüre richtet sich ausschließlich an Ärzte und dient nicht zur Information von medizinischen Laien. Die Informationen über die in der Broschüre enthaltenen Produkte und / oder Verfahren sind allgemeiner Natur und stellen weder einen ärztlichen Rat noch eine ärztliche Empfehlung dar. Da diese Informationen keinerlei diagnostische oder therapeutische Aussage über den jeweiligen medizinischen Einzelfall treffen, sind individuelle Untersuchungen und die Beratung des jeweiligen Patienten unbedingt erforderlich und werden durch diese Broschüre weder ganz noch teilweise ersetzt.

Die in dieser Broschüre enthaltenen Angaben wurden von medizinischen Experten und qualifizierten PETER BREHM Mitarbeitern nach bestem Wissen erarbeitet und zusammengestellt. Es wird größte Sorgfalt auf die Korrektheit und die Verständlichkeit der dargebotenen Informationen verwendet. Inhalt, Zusammenstellung, Struktur und Darstellung dieser Broschüre sind urheberrechtlich geschützt. Die Verbreitung und Vervielfältigung – auch auszugsweise - von Daten und Informationen dieser Broschüre (Bilder, Texte, Formulierungen, Übersichten) sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung der PETER BREHM GmbH untersagt. Bei Bedarf können Sie ein Nutzungsrecht gerne anfragen.



PETER BREHM

Die Präzision in Titan
für den Menschen

PETER BREHM GmbH
Am Mühlberg 30
91085 Weisendorf
Germany

Telefon + 49 9135 7103-0
Fax + 49 9135 7103-16
info@peter-brehm.de

www.peter-brehm.de

Join us on



CE0482



LBL546-100-20220127-DE